



 **COOLTREATMENTS[®]**
— RELOADED —

DER NEUE STANDARD FÜR
ERSTKLASSIGE LASERPROTOKOLLE


by ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES



WIR PRÄSENTIEREN

COOL LASER[®]

powered by **Dermablade[®]**

WIE COOL KANN EIN LASER SEIN?

Was macht einen Laser COOL?

Die sanfte Behandlung? Die sichtbar strahlenden Ergebnisse?
Oder der Name Asclepion, der für exzellente Ergebnisse und Qualität steht?
Die Wahrheit ist: Es ist die Kombination aus allem!

COOL LASER® ist die nächste Generation der Erbium:YAG-Technologie, die die Hautverjüngung neu definiert. Und im Mittelpunkt? Dermablate®, Asclepions Goldstandard-Erbium:YAG-Laser, von Fachleuten weltweit geschätzt.

Er ist **COOL**, weil er eine kalte Ablation ermöglicht, die Gewebe mit außergewöhnlicher Präzision entfernt und dabei die umgebende Haut schont.

Er ist **COOL**, weil er eine Reihe bahnbrechender Behandlungen ermöglicht, von ultra-präziser Lidverjüngung bis hin zur vollständigen Hauterneuerung.

Und am wichtigsten: Er ist **COOL**, weil er von Asclepion hergestellt wird, dem führenden Unternehmen in der Hochleistungs-Lasertechnologie für die Medizin.

WAS SIND COOL TREATMENTS®?

Der neue Standard für erstklassige Laserprotokolle

Asclepion leitet eine neue Ära standardisierter, exklusiver Laserprotokolle ein, die darauf ausgelegt sind, das volle Potenzial des Dermablate® Erbium:YAG-Lasers zu entfalten.

Ob für Lifting, Hautverjüngung oder -erneuerung – jede Behandlung ist für Präzision, Zuverlässigkeit und überlegene klinische Ergebnisse konzipiert.

Warum COOL TREATMENTS® funktionieren

OPTIMIERTE PARAMETER

Jedes Protokoll basiert auf sorgfältig kalibrierten Fluence-Werten, Pulsdauern und Scanning-Techniken für maximale Wirksamkeit.

VIELFALT AN HANDSTÜCKEN

In jeder Behandlungssitzung integriert, sorgen sie für gezielte, kontrollierte und effektive Energieanwendung.

DUALES THERAPIEKONZEPT

Durch die Kombination zweier Behandlungsschritte und mehrerer Lasertechnologien wird die Wirksamkeit erhöht und das Anwendungsspektrum erweitert.



IHR GUIDE ZU COOL TREATMENTS®

Premium-Behandlungskonzepte

Exklusiv für Dermablate®-Anwender bieten COOL TREATMENTS® standardisierte Laserprotokolle für sichere und effektive Behandlungen auf hohem Niveau.

Standardisiert und gleichzeitig anpassbar, folgt jedes Protokoll klinisch getesteten Richtlinien, bietet aber die Flexibilität, die Behandlungen an die individuellen Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Das Ergebnis? **Konsistente, hochwertige Resultate mit minimaler Ausfallzeit.**

Einfach auswählen. Behandeln. COOL bleiben.

COOL TREATMENTS® sind nahtlos in das Dermablate® System integriert.

Wählen Sie das gewünschte Protokoll direkt im Behandlungsbildschirm:
das System liefert automatisch die optimalen Parameter.

**Fordern Sie jetzt Ihr Software-Update an und nutzen Sie das volle Potenzial
Ihres COOL Laser® Dermablate®.**



COOL BLEIBEN MIT DIESEN BEHANDLUNGEN

Die originalen COOL TREATMENTS®

Hier hat alles begonnen.

Vier etablierte Laserprotokolle, die den COOL Ansatz von Anfang an geprägt haben: standardisierte, klar strukturierte Behandlungen, die eine präzise und reproduzierbare Behandlung ästhetischer Hautprobleme ermöglichen.

Von der Lidverjüngung über periorales Resurfacing bis hin zu vaskulären Anwendungen und Halsbehandlungen decken diese Protokolle ein breites Spektrum klinischer Einsatzbereiche ab.

Das Prinzip bleibt dabei unverändert:

präzise Behandlungen, effiziente Abläufe und minimale Ausfallzeit.

★ COOL BLEPH

Verabschieden Sie sich von müden Augen!
Eine nicht-chirurgische Blepharoplastik für obere und untere Augenlider, die einen frischen, jugendlichen Look verleiht.

★ COOLORA®

Präzise Behandlung von perioralen Falten.
Diese Hauterneuerung sorgt für glatte, straffe Haut rund um den Mund.

★ COOLYELLOW®

Eine leistungsstarke Dual-Wellenlängen-Behandlung, die vaskuläre Therapie mit Hauterneuerung kombiniert und für ein klareres, ebenmäßigeres Hautbild sorgt.

★ COOLVIVE®

Alterserscheinungen am Hals? Nicht bei uns!
Diese zweistufige Laserbehandlung strafft und festigt die schlaffe Haut im Halsbereich.

COOL BLEIBEN MIT NEUEN BEHANDLUNGEN

Frische Ergänzungen im COOL Portfolio

Das COOL Portfolio entwickelt sich weiter.

Aufbauend auf dem Erfolg der ursprünglichen Protokolle erweitern drei neue Behandlungen das Spektrum, für die gezielte Behandlung von Pigmentierungen, zur Verbesserung des Hautbildes und bei ersten Zeichen der Hautalterung.

Durch die Integration neuer Lasertechnologien und optimierter Behandlungsstrategien erweitern sie die klinischen Möglichkeiten von COOL TREATMENTS®, bleiben dabei jedoch dem gleichen Prinzip treu:

Sichtbare Ergebnisse bei minimaler Ausfallzeit.

★
COOLGLOW®

Ein sanftes und zugleich effektives oberflächliches Peeling für alle, die sich eine frische, strahlende Haut mit minimaler Ausfallzeit wünschen. Ideal als schneller Glow Booster für einen sichtbar ebenmäßigeren Teint.

★
COOL PICO®

Eine präzise Dual-Wellenlängen Behandlung, die die Wirkung eines Pikosekundenlasers mit sanfter Er:YAG-Hauterneuerung kombiniert und für einen klareren, ebenmäßigeren Teint sorgt.

★
COOL RESET®

Drehen Sie die Zeit zurück durch die gezielte Behandlung der Bereiche, die Ihr Alter am häufigsten verraten: ein fortschrittliches Laserprotokoll für Hände und Dekolleté.



COOLBLEPH

BY ASCLEPION

NICHT-CHIRURGISCHE BLEPHAROPLASTIK

Behandlungskonzept


COOL BLEPH ist eine nicht-invasive Laserbehandlung zum Straffen und Verjüngen der oberen und unteren Augenlidhaut. Es glättet Falten, reduziert Erschlaffung und hellt Pigmentierungen auf, für ein jugendliches, frisches Aussehen ohne Chirurgie. Erhältlich in drei Versionen (Mild, Pro, Light), um unterschiedlichen Patientenbedürfnissen gerecht zu werden.

Vorteile

MILD: Glättet die Haut und gleicht den Hautton aus

PRO: Reduziert Linien und Falten um bis zu 60% in einer Sitzung

LIGHT: Verbessert Verfärbungen in 1-3 Sitzungen

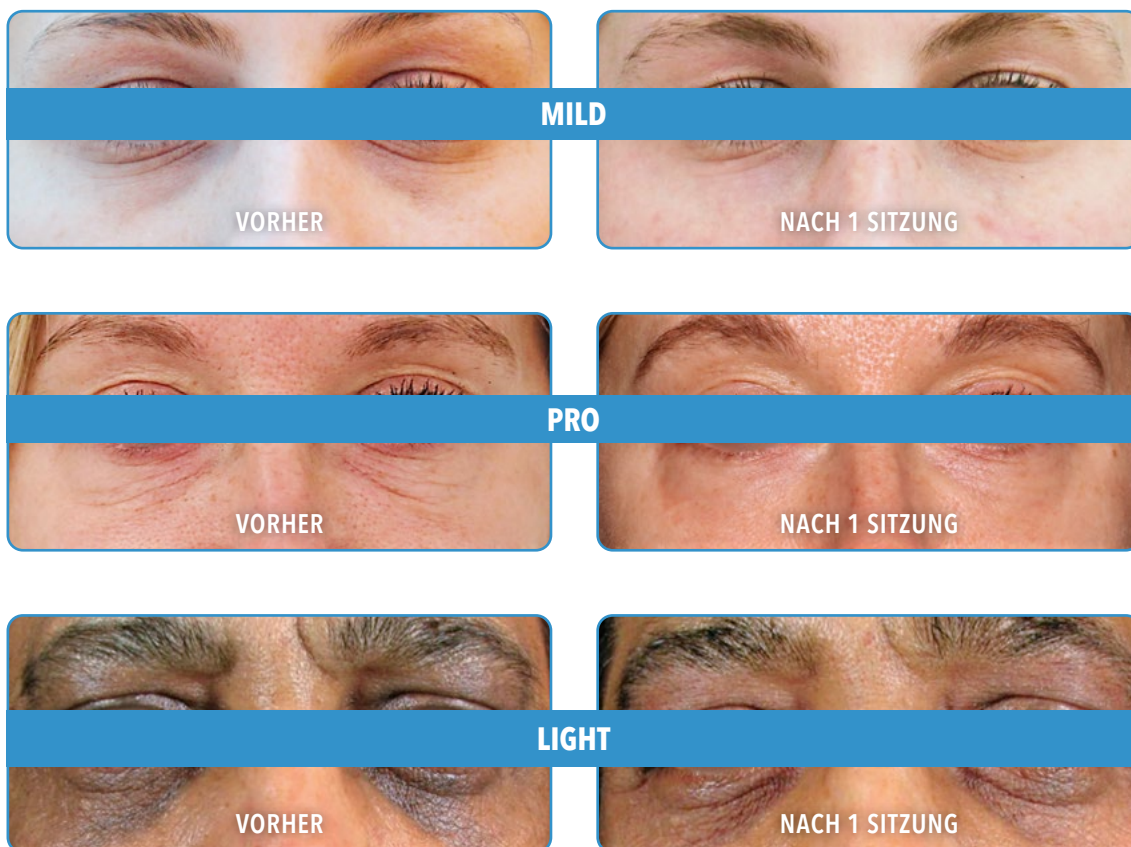

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Tapan Patel | PHI Clinic | London

Protokolle

	MILD	PRO	LIGHT
Schritt 1 – Dermablate	VarioSpot 4mm	VarioSpot 4mm	VarioSpot 4mm
Schritt 2 – Dermablate	MicroSpot EXPERT 10%	MicroSpot EXPERT 10%	MicroSpot COLD 10%
Betäubung	Nein	Ja	Ja
Behandlungszeit	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten
Empfohlene Sitzungen	2 Sitzungen	2 Sitzungen	2-3 Sitzungen
Ausfallzeit	3 Tage leichte Schwellung	3 Tage Schwellung	3-6 Tage Schwellung



COOLORA®

BY ASCLEPION

PERIORALES RESURFACING

Behandlungskonzept

COOL ORA® ist eine spezialisierte Hautverjüngung, die Glätte und Straffheit im perioralen Bereich wiederherstellt. Sie zielt präzise auf Falten und Hauterschläffung ab, entfernt gealtertes elastotisches Gewebe, stimuliert die natürliche Regeneration und strafft die Haut. Ideal für diejenigen, die eine verjüngte Mundkontur wünschen.

Vorteile

Reduziert Linien und Falten für eine glattere periorale Region

Strafft die Haut und stellt die Elastizität wieder her

Mehr als 60% Verbesserung in einer Sitzung



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Tapan Patel | PHI Clinic | London

Protokolle

Schritt 1 - Dermablate	VarioSpot 4mm
Schritt 2 - Dermablate	MicroSpot EXPERT 10% Perioral MicroSpot COLD 10% für Lippen
Betäubung	Ja
Behandlungszeit	20 Minuten
Empfohlene Sitzungen	1-2 Sitzungen
Ausfallzeit	5-7 Tage leichte Schwellung und Krustenbildung



COOLYELLOW®

BY ASCLEPION

DUALE VASKULÄRE & RESURFACING-BEHANDLUNG

Behandlungskonzept

COOL YELLOW® ist eine fortschrittliche Dual-Wellenlängen-Laserbehandlung, die 577 nm gelbes Licht für vaskuläre Anliegen mit Er:YAG-Resurfacing für Pigmentierung und Texturverbesserung kombiniert. Diese Synergie sorgt für umfassende Hautverjüngung mit minimaler Ausfallzeit.

Vorteile

Reduziert Rötungen, vaskuläre Läsionen und Sonnenschäden

Bis zu 40% Verbesserung in einer Sitzung

Minimale Ausfallzeit



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Mrs. Sarah (McNulty) Bow | Asclepion UK | London

Protokolle

Schritt 1 - QuadroStarPRO YELLOW	Scanner mit 60% Dichte bei diffuser Rötung Handstück 1 mm bei einzelnen Gefäßen
Schritt 2 - Dermablate	MicroSpot COLD 10% für ein sanftes Peeling MicroSpot EXPERT 10% für mittelstarkes Resurfacing
Betäubung	Nein
Behandlungszeit	Bis zu 30 Minuten
Empfohlene Sitzungen	2-4 Sitzungen
Ausfallzeit	2-7 Tage (Gesicht) 14-20 Tage Peeling (Körper) je nach Lasereinstellung



COOL VIVE®

BY ASCLEPION

DUALE HALSVERJÜNGUNG

Behandlungskonzept


COOL VIVE® ist ein gezieltes Laser-Lifting-Verfahren, das entwickelt wurde, um den Halsbereich zu straffen und zu revitalisieren. Durch die Stimulation der Kollagenproduktion und die Verbesserung der Elastizität werden Definition und Glätte wiederhergestellt, was eine nicht-chirurgische Alternative zu Halsliftings bietet.

Vorteile

Strafft die Haut und verbessert die Elastizität

Reduziert Falten und Sonnenschäden

Bietet einen natürlichen Lifting-Effekt

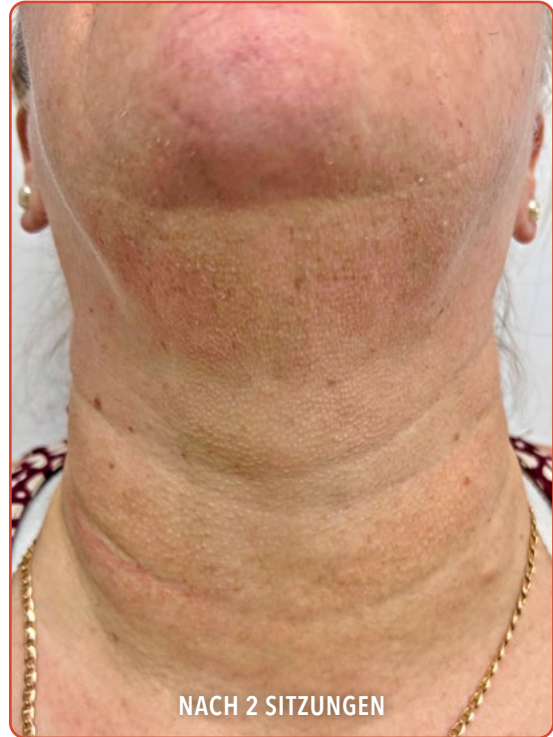

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Skiin Laser Clinic | Peterborough | UK

Protokolle

Schritt 1 - Dermablate	MicroSpot EXPERT 10%
------------------------	----------------------

Schritt 2 - Dermablate	MicroSpot HOT 25%
------------------------	-------------------

Betäubung	Nein
-----------	------

Behandlungszeit	15 Minuten
-----------------	------------

Empfohlene Sitzungen	2-3 Sitzungen
----------------------	---------------

Ausfallzeit	48 Stunden
-------------	------------



COOLGLOW®

BY ASCLEPION




LUNCH BREAK PEELING

Behandlungskonzept

Ein sanftes und zugleich wirkungsvolles oberflächliches Peeling zur Auffrischung der Haut und zur Steigerung ihrer natürlichen Ausstrahlung bei minimaler Ausfallzeit. Die Behandlung wirkt gezielt in der Epidermis und erzeugt präzise Mikroablationszonen, die eine sichtbare Hauterneuerung unterstützen.

Vorteile

- Verbessert die Strahlkraft und den Gesamthautton
 - Glättet die Oberfläche und verfeinert die Hautstruktur
 - Sorgt für ein frisches, ebenmäßiges Hautbild ohne Unterbrechung des Alltags
-

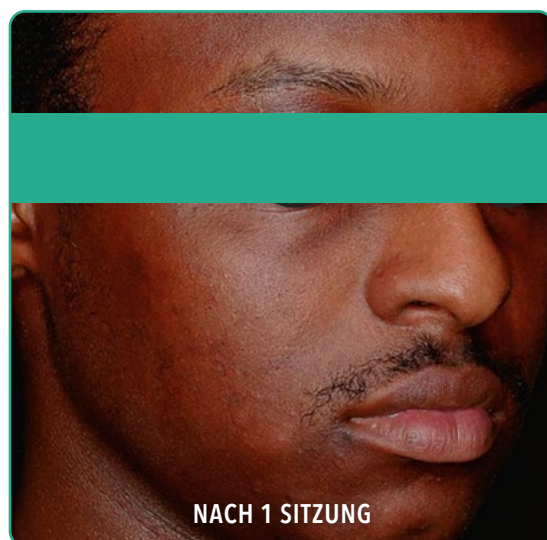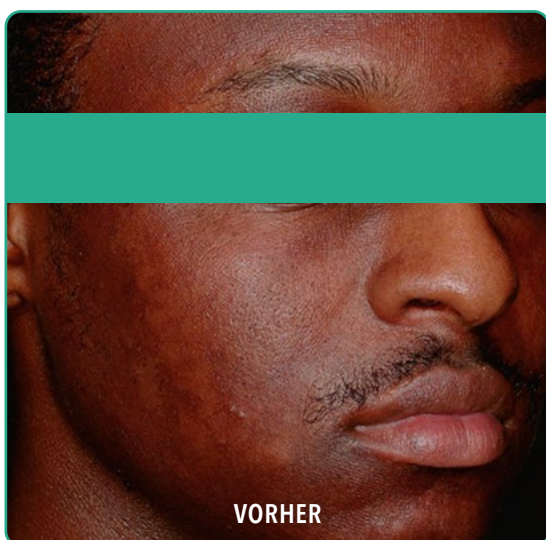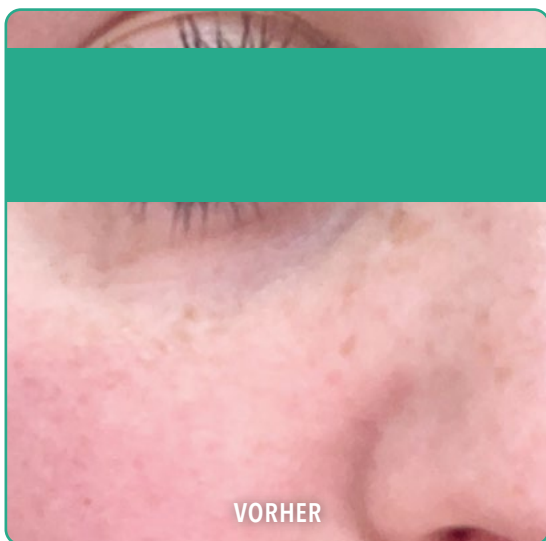

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Mrs. Sarah (McNulty) Bow | Asclepion UK | London

Protokolle

Schritt 1 - Dermablate	MicroSpot COLD 10%
------------------------	--------------------

Betäubung	Nein
-----------	------

Behandlungszeit	15 Minuten
-----------------	------------

Empfohlene Sitzungen	3 Sitzungen
----------------------	-------------

Ausfallzeit	Leichtes sonnenbrandähnliches Brennen für 4-6 Stunden
-------------	---



COOLPIGO[®]

BY ASCLEPION

PREMIUM PIGMENTKORREKTUR & HAUTERNEUERUNG

Behandlungskonzept

Dieses Dual-Wellenlängen Protokoll kombiniert die hohe Präzision eines Pikosekundenlasers zur gezielten Behandlung unerwünschter Pigmentierungen mit einer sanften fraktionierten Er:YAG-Hauterneuerung. Das Ergebnis ist ein sichtbar hellerer, gleichmäßigerer und strahlenderer Teint.

Vorteile

Reduziert unerwünschte Pigmentierungen

Verfeinert die Hautstruktur

Sorgt für einen klareren, strahlenderen Teint



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Bárbara Meléndez | Spanien

Protokolle

Schritt 1 - PicoStar	Zoom FT oder Flat-Top 532 HP, 5 mm
Schritt 2 - Dermablate	MicroSpot COLD 10% für mildes Peeling MicroSpot EXPERT 10% für mittelstarkes Resurfacing
Betäubung	Nein
Behandlungszeit	30 Minuten
Empfohlene Sitzungen	2 Sitzungen
Ausfallzeit	7-10 Tage dunklere Pigmentierung, 4-5 Tage Peeling



★ COOL RESET®

BY ASCLEPION

SIGNATURE VERJÜNGUNG FÜR HÄNDE & DEKOLLETÉ

Behandlungskonzept

Drehen Sie die Zeit in nur einer Sitzung zurück, indem gezielt die beiden Bereiche behandelt werden, die Ihr Alter am häufigsten verraten. Dieses fortschrittliche Laserprotokoll glättet feine Linien, verfeinert die Hautstruktur und stellt das natürliche Aussehen wieder her, sodass Hände und Dekolleté fester, strahlender und sichtbar verjüngt wirken.

Vorteile

- Reduziert Pigmentierungen und Sonnenschäden
 - Glättet feine Linien und verbessert die Hautstruktur
 - Verleiht der Haut neue Strahlkraft für ein sichtbar jüngeres Aussehen
-



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Skiin Laser Clinic | Peterborough | UK

Protokolle

Schritt 1 - Dermablate	MicroSpot EXPERT 10% auf dem gesamten Dekolleté Bereich MicroSpot HOT 25% im V-förmigen Bereich des Dekolletés
Schritt 1 - Dermablate	MicroSpot EXPERT 10% an den Händen, Hauttypen I-III MicroSpot COLD 10% an den Händen, Hauttypen IV-VI VarioSpot 3-4 mm nur bei Vorliegen von Keratosen
Betäubung	Nein
Behandlungszeit	20 Minuten
Empfohlene Sitzungen	2 Sitzungen
Ausfallzeit	7-10 Tage trockene Haut und Peeling

DIE KRAFT DER COOL-SYNERGIEN

Wo die Kombination von Lasern neue Behandlungshorizonte eröffnen

Der Dermablade® COOL Laser® setzt Maßstäbe für präzise Er:YAG-Resurfacing.
Seine wahre Stärke entfaltet er jedoch erst in Kombination mit ergänzenden Lasertechnologien.

Zusammen mit dem QuadroStarPRO YELLOW und dem PicoStar® erweitert der Dermablade® seine klinischen Möglichkeiten und ermöglicht es Ärzten, vaskuläre Läsionen, Pigmentstörungen, die Hautstruktur und die allgemeine Hautqualität mit größerer Präzision und Flexibilität zu behandeln.

Perfekt aufeinander abgestimmte Protokolle eröffnen ein breiteres Spektrum an Indikationen und ermöglichen es Ärzten, hervorragende Ergebnisse mit Effizienz und minimalen Ausfallzeiten zu erzielen.

Der COOL Laser® ist nur der Anfang.
Die vollständige COOL-Kombination bringt Ihre Behandlungen noch weiter.



ERBIUM:YAG - EINE TECHNOLOGIE MIT GESCHICHTE

Bahnbrechende Laserinnovationen seit 1995

Seit drei Jahrzehnten ist Asclepion an vorderster Front der Erbium:YAG-Lasertechnologie und revolutioniert die Hauterneuerung, Narbenbehandlung und ästhetische Medizin.

- 1995** MCL29 Dermablade – Startpunkt der Er:YAG-Exzellenz bei Asclepion
- 2007** Einführung der MicroSpot-Technologie für fraktionierte Therapien
- 2015** Markteinführung von Juliet – the feminine laser für die intime Gesundheit der Frau
- 2018** Einführung von Romeo für die Lasertherapie gegen Schnarchen
- 2021** Markteinführung des Dermablade®-Systems der nächsten Generation
- Heute** COOL TREATMENTS® vereinen 30 Jahre Expertise für moderne ästhetische Ansprüche




30 JAHRE EXPERTISE.
Die Zukunft der Lasermedizin beginnt hier.

COOL LASER[®]
BY ASCLEPION



COOLTREATMENTS[®]
— RELOADED —

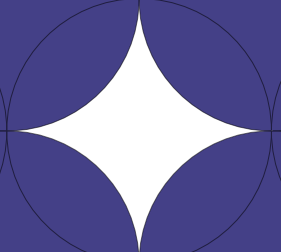

www.cooltreatments.de

Asclepion
Laser Technologies